

Treoracha le haghaidh Úsáide

Feadáin Micrimhíseogra Hematocrit (Gloine)

Cuspóir atá beartaithe

Tá feadáin micrea-hematocrit ceaptha chun samplaí fola ribeach ó dhaoine a láimhseáil, a iompar agus a stóráil chun críche scrúdú diagnóiseach *in vitro* agus úsáid saotharlainne. Is féidir na ribeadáin a úsáid freisin chun sreabhán coirp eile a choinneáil.

Tá feadáin micrea hematocrit beartaithe le haghaidh úsáide gairmiúla ag dochtúirí, altraí, agus teicneoirí saotharlainne, atá oilte le haghaidh sampláil fola ribeach. Féadfar na feadái a úsáid i dtimpeallacht tástála gar-othair.

Rabhaidh/Teorainneacha Úsáide

- Léigh na treoracha go cúramach roimh úsáid.
- Feidhmigh na réamhchúraimí is gá chun samplaí bitheolaíocha a láimhseáil. Úsáid lámhainní agus gloiní cosanta sábháilteachta.
- Bí cúramach agus an feadán á shéalú chun sceitheadh a sheachaint.
- Ná athúsáid an táirge.

⚠ AIRE: Gloine! Láimhseáil go cúramach! Ná lúb an feadán mar d'fhéadfadh sé briseadh. Seachain gortuithe féideartha de bharr briste gloine. Contúirt ionfhabhtaithe! Iarracht leighis láithreach.

Eolas

Tá ar a laghad 4-7 IU heparin sna feadáin micrea-hematocrit mar atá forordaithe le caighdeán ISO 12772.

Is féidir na feadáin micrea hematocrit a úsáid le lártheifneoir. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar conas an lártheifneoir a úsáid, féach le do thoil don Lámhleabhar Úsáideora cuí don lártheifneoir lena mbaineann.

Roghnú an Láithreáin Samplála

Bailítear an sampla fola ribeach ó ghearradh nó puncture sa mhéar, ar an earlobe nó ar sháil (nuabheirthe) an othair.

Conas a Úsáid

Líontar na feadáin micrea hematocrit tríd an bhfeadán a choinneáil ag foirceann amháin i suíomh cothrománach le beagán uillinn agus an foirceann eile a thumadh i braon fola. Ní mór feadáin micrea hematocrit a líonadh ón deireadh os coinne an chóid datha. Ní mór an foirceann dathchódaithe a choinneáil saor ó fhuil lena chinntiú go bhfuil an séalú seicheamhach suas éifeachtach.

Má tá na feadáin calabraithe, ná líon ach go dtí an marc caolaithe caol dubh.

Coinníollacha Stórála

Ba cheart na feadáin micrea hematocrit a stóráil tirim ag teocht an tseomra atá cosanta ó sholas na gréine ar feadh suas le 4 bliana.

Díúscairt

Cuir gach rialachán díuscartha áitiúil ábhartha i bhfeidhm chun an díúscairt shábháilte a chinneadh.

⚠ RABHADH: Déileáil le dramhaíl mar ábhar bithghuaiseach. Déan dramhaíl a dhíúscairt de réir threoracha agus nósanna imeachta saotharlainne glactha.

Teagmhais a Thuairisciú

Déanfar aon teagmhas tromchúiseach a tharla maidir leis an bhfeiste a thuairisciú don mhonaróir agus d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-úsáideoir agus/nó an t-othar lonnaithe.

Sonraíochtaí

Úsáid beartaithe	atá	Tástáil mhicrhematocrit agus tástálacha anailíseacha eile lena n-áirítear scaradh plasma agus cealla. (Is féidir é a bheith brataithe le frith-théachtach, m.sh., chun galair fola a scrúdú)
Ábhar		Gloine aoil sóid, gloine Borosilicate
Frith-théachtach		Heparin sóidiam(dearg), heparin amóiniam (glas), heparin litiam (oráiste), EDTA(Corca) nó Plain(Gorm), léirithe ag líne daite.
Lasair snasta		Lasair snasta i bhfoirceann amháin (deireadh cód datha)
Fad		Caighdeán: 75 mm
Trastomhas Istigh (ID)		ID gloine = 1.15 mm
Trastomhas Amuigh (OD)		Caighdeánach OD = 1.55 mm
Trastomhas Lamháiltais (OD/ID)		Gloine: ±0.05 mm
Fad Caoifhulaingt		Gloine: ±0.50 mm
Le haghaidh trealamh seo a leanas		Le húsáid le lártheifneoir
Gabhálais		Pláta Céir
Seilfré		Gloine: 4 bliana



Monaróir Vitrex Leighis A/S

Vaisc 6-8
2730 Herlev
an Danmhairg
Fón: +45 44947011
Ríomhphost: vitrex@vitrex.dk
<https://www.vitrexmedical.com/>

Úinéir an trádhaire MARIENFELD SuperIOR

Paul Marienfeld GmbH & Co. KG
Am Wöllerspfad 4
97922 Lauda-Königshofen
an Ghearmáin