

Istruzzjonijiet għall-użu

Pipetti ring mark

Indikazzjoni

Tubi kapillari huma maħsuba għall-immaniġġjar, it-trasport u l-ħażna ta' 'kampjuni tad-demem kapillari uman għall-iskop ta' ttestjar dijanjostiku in vitro u użu fil-laboratorju. Il-kapillari jistgħu jintużaw ukoll biex jassorbu fluwidi oħra tal-ġisem.

Tubi kapillari huma maħsuba għal użu professjonali minn tobba, infermiera u tekniċi tal-laboratorju mħarrġa fil-ġbir tad-demem kapillari. Il-prodotti jistgħu jintużaw f'ambjent tat-test qrib il-pazjent.

Prekawzzjonijiet/Limitazzjonijiet ta' Użu

- Aqra l-istruzzjonijiet għall-użu bir-reqqa qabel l-użu.
- Osserva l-prekawzzjonijiet standard meta timmaniġġja kampjuni bijoloġiċi. Uża ingwanti u nuċċalijiet tas-sigurtà
- Il-prodott le użu mill-ġdid ..

⚠ Attenzjoni Glass! Immaniġġja b'kawtela! Tgħawwiġx il-pajp, inkella jista' 'jinkisser. Oqgħod attent għal korrimenti possibbli minn ħġieġ miksur. Riskju ta' infezzjoni! Ara tabib immedjatament.

informazzjoni

Il-pipetti tal-marka taċ-ċirku huma maħsuba għal applikazzjonijiet fejn huwa meħtieġ volum ta' tubu kapillari preċiż ħafna . Il-pipetti jikkonformaw mal-ISO 7550.

Għażla tal-punt tal-kampjun

Il-kampjun tad-demem kapillari jittiehed minn qatgħa jew titqib fis-saba', il-lobu tal-widna, jew l-għarqub (tarbija tat-twelid) tal-pazjent.

metodu

Il-pipetti tal-marka taċ-ċirku jimtlew billi żżomm tarf wieħed tal-pipetta f'pożizzjoni orizzontali f'angolu żgħir u tgħaddas it-tarf l-ieħor f'qatra demm

Il-pipetti tal-marka taċ-ċirku għandhom jimtlew biss sal-marka rqiqa tal-kalibrazzjoni.

Kundizzjonijiet tal-ħażna

Il-pipetti ring mark għandhom jinħażnu niexfa f'temperatura ambjentali u protetti mid-dawl tax-xemx sa 4 snin.

rimi

Segwi r-regolamenti lokali kollha rilevanti dwar ir-rimi biex tiżgura rimi sikur.

- ⚠ **TWISSIJA:** Ittratta l-iskart bħala materjal potenzjalment bijoperikoluż. Armi l-iskart skond l-istruzzjonijiet u l-proċeduri aċċettati tal-laboratorju.

Rappurtar ta' Inċidenti

L-inċidenti serji kollha relatati mal-apparat għandhom jiġu rrapportati lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih l-utent u/jew il-pazjent huwa stabbilit.

Speċifikazzjonijiet

Għan tal-użu	Fil-laboratorji għat-trasferiment ta' 'volumi żgħar u definiti ta' likwidu, generalment sa 1 µL . Jintużaw ħafna fil-kimika, il-bijoloġija, il-medicina forensika, il-laboratorji ta' 'riċerka farmaċewtika u farmaċewtika. (Jista' 'jiġi miksi b'antikoagulant, eż. għall-ittestjar tal-mard tad-demem).
materjal	Ħġieġ borosilikat
Antikoagulant	Mingħajr (antikoagulant fuq talba)
Illustrat bin-nar	Iva, fit-tarf tal-kodiċi tal-kulur
tul	125mm
tolleranza volum	0.30%
Tolleranzi dijametru	± 0.05 mm (dijametru ta' 'barra)
tolleranza tul	± 1.0mm
Aċċessorji	Għajnuna għall-pipettar mikro
durabilità	Ħġieġ : 4 snin

Tolleranzi

Vol. (µl)	preċiżjoni	Koeffiċjent tal-varjazzjoni (CV)
1-5	±0.30%	0.60%
10-200	±0.25%	0.50%



Manifattur

Vitrex Medical A/S

Vasekær 6-8

2730 Herlev

Denmark (id-Danimarka)

Tel.: +45 44947011

Email: vitrex@vitrex.dk

<https://www.vitrexmedical.com/>



Sid il-marka MARIENFELD SUPERIOR

Paul Marienfeld GmbH & Co KG

Wöllerspfad 4

97922 Lauda-Königshofen

Deutschland (il-Ġermanja)