


## Használati utasítás

**Sejtszámláló kamrák a DIN 12847 szabvány szerint**

### Alkalmazási terület

A használati utasítás a táblázatban felsorolt összes UDI sejtszámláló kamrára vonatkozik, amelyek in vitro diagnosztikai orvostechnikai IVD eszközként vannak címkézve és a használati utasítással felcímkézve. 

<b>UDI számláló kamra</b>
4262367210003

Az (EU) 2017/746 rendeletnek megfelelő in vitro diagnosztikai **számláló kamrák** speciális optikai üvegből készülnek, és mikroszkópos vizsgálatokra alkalmasak.

**Jelzés**  
**A sejtszámláló kamrákat a részecskék** (pl. leukociták és eritrociták a vérben, baktériumok a folyadékkultúrában) számának meghatározására használják. A számlálást mikroszkóp alatt végzik, miután a számláló kamrára fedőüveget helyeztek. Az illetékes laboratóriumok képzett személyzettel rendelkeznek, ezért nem a gyártó felelőssége, hogy leírja a kamra feltöltésére és a részecskék megszámlálására alkalmazandó eljárást a feladattól függően. Erre a célra kiterjedt szakirodalom és szakkönyvek is rendelkezésre állnak.

### Általános kezelés

#### Figyelmeztetés



Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen az összes információt.



Ha a csomagolás felbontásakor már láthatóak a sérülések vagy az üvegtörés jelei, akkor a szemüveg nem használható.

A számláló kamrák diagnosztikai használatát és a készítmények értékelését orvos vagy szakképzett személyzet végzi az orvos felelőssége mellett.


A vonatkozó nemzeti jogi helyzetnek megfelelően kell eljárni. A balesetvédelmi és higiéniai előírásokat is be kell tartani.



A potenciálisan fertőző mintaanyag kezelése során gondoskodjon a megfelelő egyéni védőfelszerelés használatáról. A beltéri levegő minőségének betartása a nemzeti előírásoknak megfelelően (pl. irányelv a kórházi higiénia és fertőzésmegelőzés, RKI) garantálni.

#### Alkalmazás

- A számláló kamrák üvegből készülnek. Óvatlan kezelés esetén fennáll a törés és a sérülés veszélye.
- A kamra alja és az érintkező felületek (lásd az ábrát) polírozottak. Ennek a felületnek a mechanikai sérülését el kell kerülni.
- A kamra padlóján lévő számlálórácsot 2 µm-nél kisebb tűréssel gyártják. A mechanikai sérüléseket és a hőmérsékleti sokkokat el kell kerülni.
- Ha a számláló kamrákat többször használják, a fenti utasításoknak megfelelően kell tisztítani. A számláló kamrák enyhe fertőtlenítőszerrel történő tisztítás után többször is használhatók. A tisztítást a lehető legnagyobb gondossággal és óvatossággal kell elvégezni a sérülések és a számlálókamra károsodásának elkerülése érdekében. Ne használjon savas, erősen lúgos vagy oldószer alapú tisztítószeret.

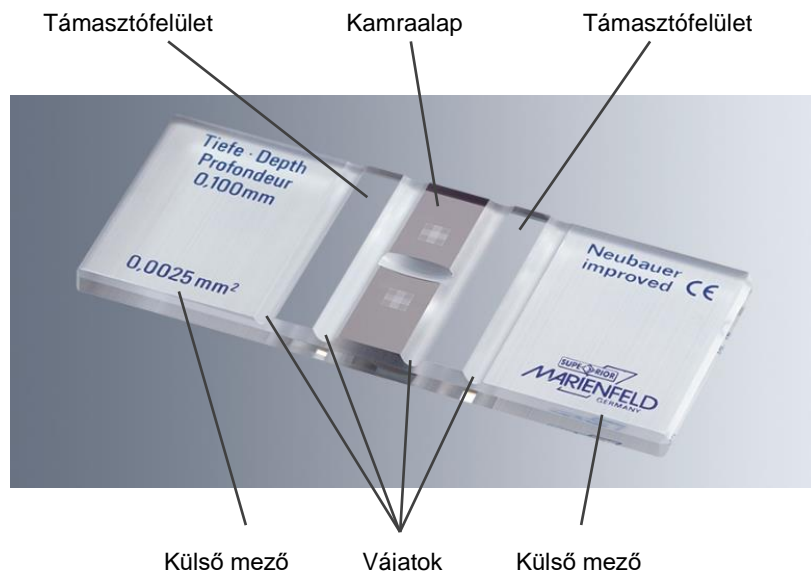



## Üzenet

A termékkel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a Poly-Optiknak mint gyártónak és a felhasználó székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

## Gyártó



Poly-Optik GmbH  
Obere Marktstraße 3  
07422 Bad Blankenburg  
Deutschland (Németország)  
Telefon: +49 (0) 36741 2284  
Fax; +49 (0) 36741 2325  
E.Mail: [info@poly-optik.de](mailto:info@poly-optik.de)  
Internet: [www.poly-optik.de](http://www.poly-optik.de)

## Aláíró

Dr. Axel Weidner, ügyvezető igazgató és felelős személy  
a Poly-Optik GmbH szabályozási követelményeinek való megfelelés érdekében

## A MARIENFELD SUPERIOR márka tulajdonosa

Paul Marienfeld GmbH & Co KG  
Am Wöllerspfad 4  
97922 Lauda-Königshofen  
Deutschland (Németország)